

## Positioneringskit

- lånat av Hjälpmedel Västerbotten

### Innehåll

- En påse märkt "Rena överdrag"
- En tvättpåse märkt "TVÄTT", för använda/smutsiga överdrag
- Beställningsunderlag
- Sex olika positioneringskuddar, enligt nedan:



37795 Mellan barnackkudde  
37793 Bomullsöverdrag



21488 Stor halvmåne  
37794 Bomullsöverdrag



32080 Liten banan  
32155 Bomullsöverdrag



35608 Stor banan  
32167 Bomullsöverdrag



37937 Stor fyrkant  
38101 Bomullsöverdrag



22682 T-kudde large  
32156 Bomullsöverdrag

## Instruktion för lån av positioneringskit

Använd överdrag till de kuddar ni provar.

Efter utprovning:

- Sprita de kuddar ni använt.
- Lägg använda överdrag i tvättpåsen märkt "tvätt".
- Lägg kuddar och påsar i väskan.
- Om du använt ett rum bokad av Hjälpmedel Västerbotten:  
Byt underlakan och örngott som finns i rummet samt torka rent dörrhandtag/handtag med sprit.

Positioneringskit återlämnas snarast efter utprovning.

### Retur utprovningskit

Byt plats på adresslapparna i plastfickan på väskan så att adresslapp "Åter till HVM" blir synlig.

Sänd väskan åter till HVM enligt era lokala rutiner.

För er som använder er av slingbil, kontakta Kundtjänst och meddela att väskan kan hämtas.

Använder ni Bussgods, skriv ut fraktsedel med returadress Hjälpmedel Västerbotten.

### Kontakt hjälpmedelskonsulent

Linn Elstig                      linn.elstig@regionvasterbotten.se

Christer Johansson          christer.johansson@regionvasterbotten.se