


Lägga till nya lotnummer för testremсор



Tryck  så öppnas fönstret *Huvudmeny 2*.



Tryck på **Remsloter** så öppnas motsvarande meny.

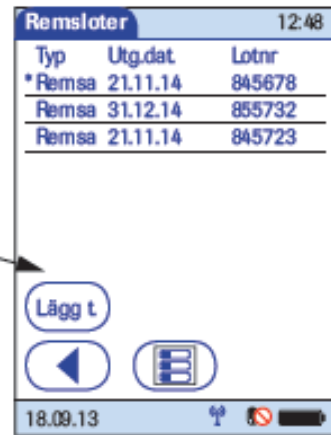


Tryck på **Lägg t.** för att lägga till information om en ny testremselot från ett nytt chip. Fönstret *Lägga till remslot* öppnas.





Sätt i det nya chipet i chipläsarens öppning. En ljusdiod börjar blinka.





Påbörja hämtning av data genom att trycka på .


Placera chipläsaren på en plan yta, t.ex. en bänk. Håll mätaren 10–15 cm ovanför chipläsaren så att kontakt uppstår mellan de två infraröda fönstren

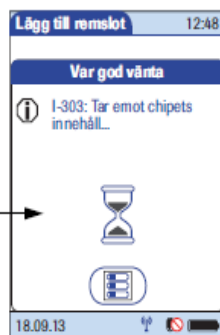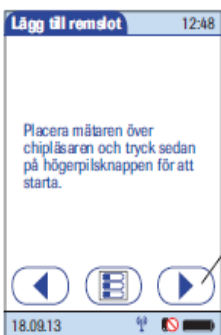

När kontakt uppstår visar mätaren statusinformation om överföringen.

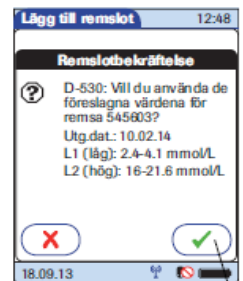

Tryck på  För att bekräfta informationen

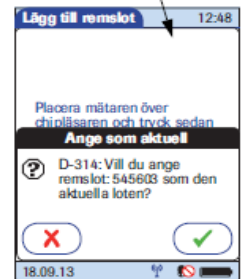


Lägga till nya lotnummer för kontrollösningar




Tryck  så öppnas fönstret *Huvudmeny 2*.



Tryck på **Kontroller** så öppnas motsvarande meny.

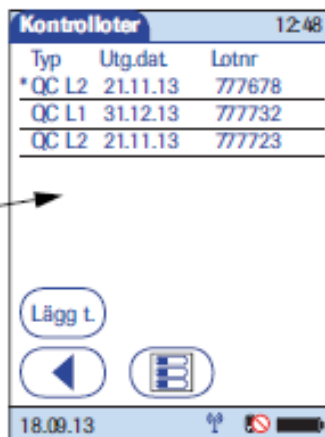

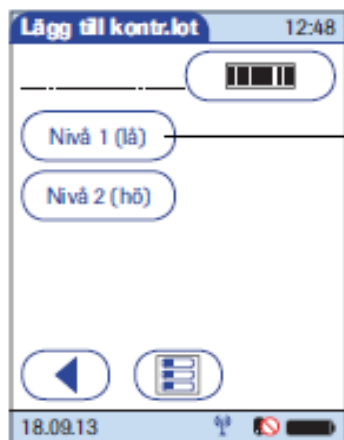


Tryck på **Lägg t.** för att lägga till information om en ny kontrolllot. Fönstret *Lägga till kontrollot* öppnas.




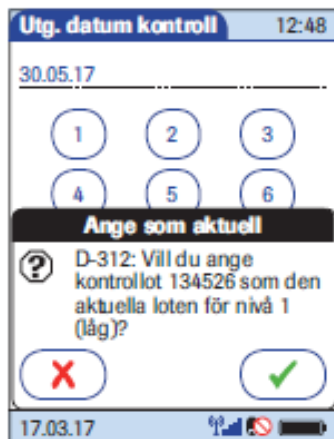
Välj kontrollnivå



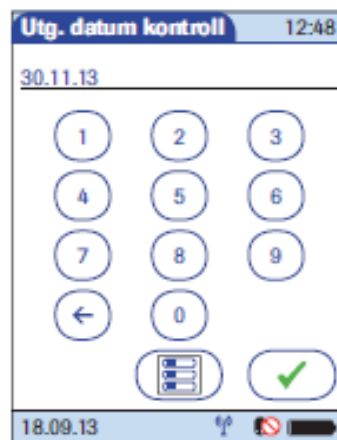

Ange lotnummer och tryck på  eller tryck på  och scanna in informationen



Ange det utgångsdatum som visas på kontrollösningens flaska. Tryck på 



Tryck på  för att bekräfta att det här lotnumret är det som ska användas för tillfället.

Tryck på  om du vill spara posterna utan att ange lotnumret som det aktuella lotnumret.