


cobas[®] h232: Utföra ett patienttest




Slå på mätaren med On/Off-knappen

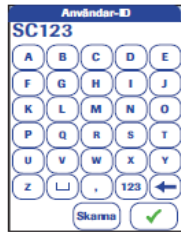


Skriva in eller scanna ditt användar-ID



Välj **Patienttest**.
Skriv eller scanna in patient-ID

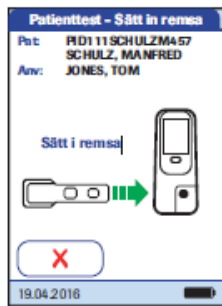


För in testremsan snabbt när symbolen för testremsan visas

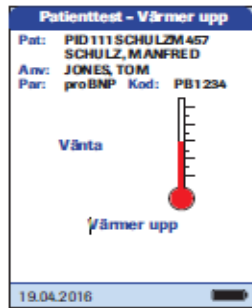


Testremsan värms upp




Dra upp exakt 150 µL prov med dosersprutan utan att korka av provröret

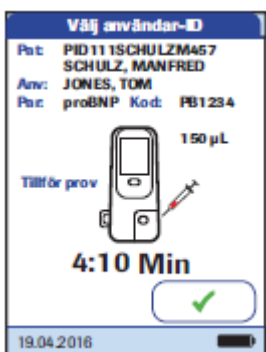


När symbolen för dosersprutan visas skall exakt 150 µL av provet tillföras inom 4 minuter. Tillför provet i en jämn ström utan uppehåll. **Tryck därefter på den gröna bocken**  **för att starta analysen**



När resultatet visas kan en kommentar läggas till genom att trycka på  Tag ut testremsan och slå av instrumentet.


cobas® h232: Utföra ett patienttest

Byta Kodchip

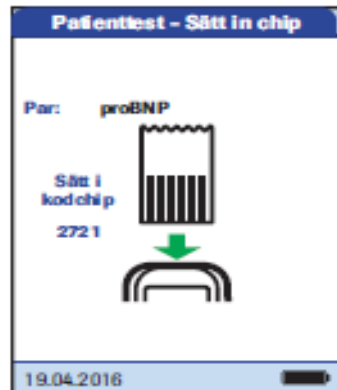

Varje frp med testremsor har ett eget kodchip. När du öppnar en ny frp skall du föra in kodchipet i instrumentet. Texten på kodchipet skall vara uppåt. Saknas information om en lot ombeds du sätta in kodchipet som tillhör den testremsa, som du har satt in i instrumentet.

Tillföra provmaterial till testremsan

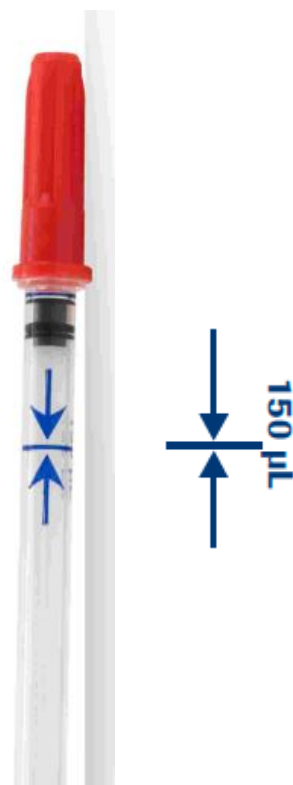

Tillför **hela** provet till applikationsfältet på testremsan i en jämn ström, utan uppehåll och utan att skvätta. Var noga med att inte beröra brunnens botten med sprutspetsen

Var noga med provvolymen. Dosersprutan har en markering för rätt volym på 150 µL