


Utföra ett patienttest



Tryck på och släpp upp på/av-knappen.

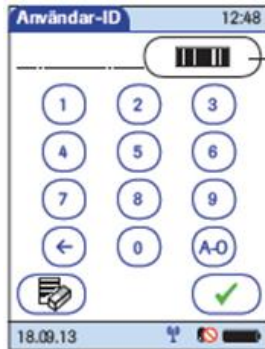

Ange användar-ID med hjälp av knappsatsen eller med Streckkodsläsaren.

Tryck på knappen **Skanna***




I fönstret Huvudmeny trycker du på knappen **Patienttest**.



Ange patient ID manuellt och bekräfta med för att gå vidare eller använd funktionen **Skanna***



* **Skanningstips:** Håll mätaren så att streckkodsläsarens fönster är ca 10-20 cm från streckkod.

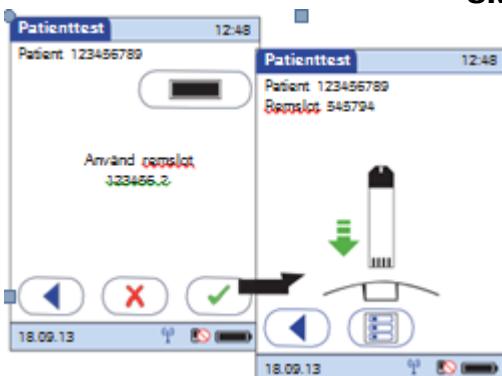

Bekräfta testremseloten.


Om den är korrekt trycker du på

Du uppmanas att sätta in testremsan.

Om den är felaktig trycker du på och väljer en annan lot



Sätt i testremsan.

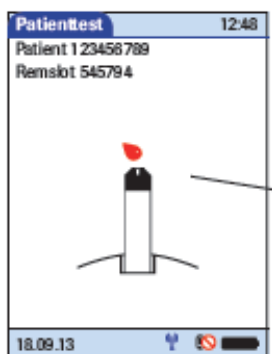


Vänta tills en blinkande droppe visas i displayen innan du applicerar blodet.


Applicera bloddroppen på **testremsans framkant** (gult doseringsområde). Applicera inte blodet längst upp på remsan. Blodet dras in i testremseområdet genom kapillärkraft. Blod längst upp på testremsan kan inte testas.



När en tillräcklig mängd blod har detekterats avger mätaren en signal och mätningen startar.

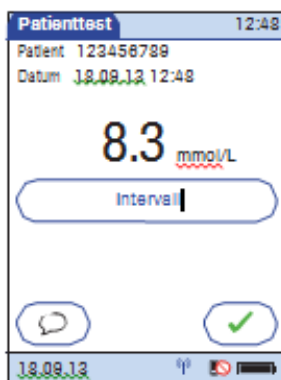


När testet har slutförts och resultatet är färdigt avger mätaren en signal. Acceptera resultatet med eller tryck på knappen för att lägga till en kommentar

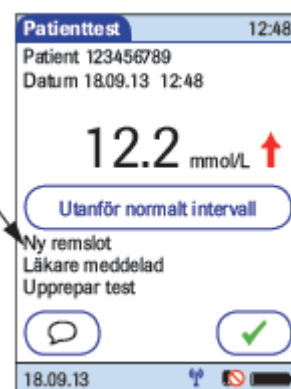

Välj önskad fördefinierad kommentar i den lista som visas. **Maximalt 3 stycken.** Bekräfta med och du kommer tillbaka till provsvaret



När du valt kommentar kommer man tillbaka till provresultatet och kommentaren finns nu med under svaret. Om du vill ändra kommentar kan du åter trycka på . Nu är detta patientsvar färdigt. Bekräfta genom att trycka på för att återgå till huvudmenyn

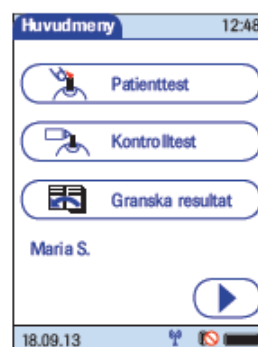

När du återgått till denna huvudmeny kan du inte längre ändra något med ditt tidigare svar.